

SmartFoot – Gasflaskhållare till Proton akutbrits – Nr 513755

SmartFoot gasflaskhållarkonsol till EVAB Proton akutbrits är framtagen för att säkra hantering av exempelvis AGA 3L eller 2L LIV-flaska när man önskar fästa denna vid sängens huvudände. Annan medicinteknisk utrustning kan enkelt och säkert fästas på en IVA-skena såsom sugkanister, kateterhållare m.m. utrustning. Skenans infästning är ergonomiskt utformad för "krockfri" fastsättning av utrustningen. Gasflaskhållaren är enkelt flyttbar mellan olika sängar genom sin enkla och säkra låsfastsättning mot sänggavelns ovala rörstomme. Genom sin utformning säkerställs, oavsett sängläge, att gasflaskan omöjligt oavsiktligt kan lossna eller falla av akutbritsen.



Hantering och bruksanvisning. Flaskhållarkonsolen är klar att användas och kan direkt hängas över sänggavelns huvudändes ovala rörstomme. För den helt t.v. och lås fast de två låsrattarna med handkraft så att den sitter säkert fast. All hantering av gasflaskan skall ske varsamt så att skador på flaskan undviks! Trä i gasflaskan snett uppifrån, hållande i flaskans handtag, eventuellt samtidigt med vridande av flaskan försiktigt. Se till att den säkert glider ner i den rostfria polerade flaskhållaren samt med bottenstödet i kontakt med flaskans flata botten. Fastlåsning behövs i regel inte men kan givetvis kompletteras med en enkel spännrem om så önskas. Montera eventuell klove eller på annan erforderlig utrustning på IVA-skenan. - Ansluten slang och annan hängande utrustning skall under alla förhållanden fästas på ett sådant sätt att de omöjligt tillåts släpa i golvet eller ens i närheten av hjulen eller annan sängjusteringsanordning. Vid oförsiktighet kan detta i sig orsaka snubbelrisk eller annan uppenbar risk för patient, personal eller skada på utrustning. Vid flaskbyte lossas ansluten gasutrustning och med fattning av gasflaskans handtag, dras den försiktigt upp ur flaskhållaren. En viss vridning kan ev. behövas under losstagningen så att flaskans ytbehandling inte skadas. Rengöring skall ske med vedertagen standardmetod inom vården. Periodisk teknisk kontroll skall utföras på alla skruvförband och skador skall åtgärdas omgående!

Gasflaskhållare till Dolomite Futura 600 rollator – Nr 513761

SmartFoot gasflaskhållarkonsol till Dolomite rollatorer av olika typ. Gasflaskhållaren har till uppgift att säkert hålla fast och hantera AGA 3L eller 2L LIV-flaska. Likaså säkerställs hanteringen samtidigt som Dolomite-vagnen skall kunna fällas samman för transport, - t.o.m. med gasflaskan monterad. Vid normal användning kan flaskan inte falla ur. Flaskan kan dock ytterligare säkras genom att spännas fast med den fastsatta spännremmen runt gasflaskans hals, under regulatornheten. Spännremmen hängs över flaskhållaren före isättning av gasflaskan.

Konsolen är konstruerad symetriskt vändbar och kan därför monteras med gasflaskventilen åt valfritt håll. Normalt levereras den som på bilden intill. Utprovning har skett med modell Futura 600 men torde sannolikt fungera lika säkert mot andra modeller ur Dolomite-serien. Får utprovas från fall till fall ur monterings- och säkerhetssynpunkt. Gasflaskhållaren kan även kompletteras med dropprör och krokar och utarbetas då i samråd med SmartFoot tekniker.

Montering. Utprovning och montering skall utföras av sjukhusets medicintekniker och i samråd med behörig terapeut. – Vid montering skall vagnen vara helt felfri och nedan anvisningar följas omsorgsfullt. Med vagnen uppfälld, placeras den på ett stabilt plant underlag. De två sidorören är Ø25mm och det horisontella mellanröret Ø22mm. Konsolen skall monteras fast med hjälp av motsvarande friktionsbeslag, märkta 25 resp. 22 inuti, enligt vidstående bilder. 8st M6x35 A4 syrafast insexskruv och mutter, vilka monteras samman med ramverk och konsol. Rikta in beslagshalvorna runt ramverksrören med skruvarna och rikta in dessa mot den platta konsolens hål. Låsvätska typ LockTite skall ovillkorligen användas vid monteringen av muttrarna på skruvförbanden. Sidorullarna på bilden längst t.h. är tillbehör och är enkla att montera samt offereras separat. De är avsedda att monteras löst roterbara ovanför det främre hjulparet och underlättar förbipassage av hinder samt sparar omgivande väggar och höga golvssocklar effektivt.

Bruksanvisning. Hantering av gasflaska beskrivs i avsnittet ovan om gasflaskhållare för Proton-sängen samt rengöring och kontroll, gäller fullt ut även här! Flaskan skall låsas fast med den monterade säkerhetsremmen när det anses nödvändigt.



SF\INFO\513755 - 513761 Gasflaskhållare till externa produkter. - 150628

SmartFoot AB

Huvudkontor, konstruktion: Övre Åsvägen 3, 439 37 Onsala, Sverige
Showroom, Produktion och lager: Fasanvägen 55, södra gaveln, 434 91 Kungsbacka, Sverige
Tel: (+46 300 26357) 0300 26357, 0705 926357, Fax: 0300-29357 - www.SmartFoot.se - info@SmartFoot.se

